



Een epithese nodig?



Ortho-technics

Bij ons bent u in goede handen.



Prothesen | **Epithesen** | Maatwerk orthesen | Confectie orthesen |
Silverringsplints | Orthopedische korsetten | Sport orthesen/prothesen

Wij helpen u vooruit!

Wij helpen u vooruit!

Een amputatie door een ongeval of een aandoening is een ingrijpende gebeurtenis. De komende periode werkt u met een deskundig multidisciplinair team aan uw herstel. Bij ons bent u in goede handen. Een epithese kan u helpen uw hand beter te gebruiken, zodat u uw dagelijkse bezigheden kan blijven uitvoeren.

In deze folder geven we u meer inzicht in het proces van het verstrekken van een epithese.

Wat is een epithese?

Een epithese is een siliconen prothese die een deel van een vinger, hand, teen of voet vervangt. Een epithese heeft een levensechte uitstraling.

Ook maakt een vinger- of handepithese het makkelijker om voorwerpen vast te pakken. Een epithese wordt op maat gemaakt en met zorg door uw orthopedisch technoloog aangemeten om zo optimaal mogelijk te passen.



Bij Ortho-technics wordt er echt naar me geluisterd en naar wat ik nodig heb.



Naomi Lindelauf



SEMHCertificering

Ortho-technics is SEMH gecertificeerd en voldoet aan de strenge eisen van deze onafhankelijke stichting. Daarnaast zijn we aangesloten bij brancheorganisatie NVOS-Orthobanda.



Ortho-technics: uw specialist in orthopedische hulpmiddelen

Bij **Ortho-technics** werken bevlogen vakmensen die zich elke dag inzetten om u vooruit te helpen. Wij begeleiden u gedurende het hele traject en willen u zoveel mogelijk ontzorgen. Onze orthopedisch technologen zijn verantwoordelijk voor de maatname, productie en nazorg van uw orthese en hebben daartoe een hbo-bacheloropleiding afgerond.



Mensen vertellen
me regelmatig dat
de epithese niet
eens opvalt.

Joep Cluitmans

Uw epithese, onze expertise

Een epithese is maatwerk en wordt volledig met de hand vervaardigd. Het eindproduct is een siliconen epithese met een levensechte uitstraling.

Intakegesprek

Samen met u plannen we een intakegesprek in met één van onze orthopedisch technologen. We bespreken uw wensen en doelen en bekijken hoe de epithese vorm gaat krijgen.

Maatname

Tijdens de maatname maken we een afdruk van het aangedane lichaamsdeel. Ook bepalen we de kleur van de epithese aan de hand van uw huidskleur. Uw eigen huidskleur varieert enigszins onder invloed van kou, zonlicht of warmte. Houd er dus rekening mee dat een kleine kleurafwijking kan voorkomen.

Proeffase

Vervolgens wordt er een proef epithese gemaakt. Deze is nog doorzichtig zodat we goed kunnen beoordelen of de pasvorm optimaal is. U krijgt de proef epithese mee naar huis, zodat u er in het dagelijks leven aan kan wennen. Zo merkt u het beste of de pasvorm en functionaliteit optimaal zijn. Als de epithese voor u | optimaal past, maken we de definitieve epithese.

Controle

Tijdens het gehele proces vinden er diverse controlemomenten plaats. Nadat u de epithese heeft ontvangen, wordt deze jaarlijks gecontroleerd. U ontvangt hiervoor een schriftelijke uitnodiging. Liever eerder een afspraak? Dan kunt u eenvoudig telefonisch een afspraak inplannen via 085 - 273 36 10.

Hoe zit het met de vergoeding?

U bent door uw revalidatiearts doorverwezen en komt in aanmerking voor het aanmeten van een prothese. Deze wordt door uw zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering volledig vergoed. Mocht er nog een eigen risico openstaan, dan wordt dat eerst afgeschreven.

De zorg voor uw epithese

Onderhoud en reparatie

Uw epithese is een kostbaar bezit. Het is dan ook belangrijk deze goed te onderhouden.

- Spoel dagelijks af met water en een PH-neutrale zeep. Eenmaal afgedroogd kunt u de epithese weer gebruiken.
- Is de epithese vuil? Laat maximaal 1 uur weken in een bak warm water met Steradent of soda.
- Bij hardnekkig vuil kunt u een doek met wat bio-ethanol of Dasty gebruiken. Gelieve dit te beperken.

Let op

- Jeans kunnen blauw afgeven op de epithese. De verkleuring is dan niet meer te verwijderen.
- Beschadigingen door bijvoorbeeld scherpe voorwerpen kunnen niet meer worden gerepareerd.

Gebruiksdur en garantie

De gebruiksduur en garantie kan per zorgverzekeraar en zorgpolis verschillen. We raden u aan vooraf uw verzekeringspolis te controleren.

Altijd dichtbij

Bel voor een afspraak bij één van onze orthopedisch technologen: 085 - 273 36 10.

Onze contactgegevens

Ortho-technics B.V.

Groenenweg 1
6432 HG Hoensbroek
T 085 - 273 36 10 | F 085 - 273 36 11
info@ortho-technics.nl
www.ortho-technics.nl



Ortho-technics

Ortho-technics is gevestigd op diverse locaties in Zuid-Limburg en Noord-Brabant. Bij al onze locaties vindt u gratis parkeergelegenheid voor de deur.

Hoensbroek

Groenenweg 1
6432 HG

Hoensbroek, locatie Adelante

Schuureikenweg 60
6432 HX

Sittard

Kleine Steeg 7-H
6131 KJ

Eindhoven

Croy 7
5653 LC

