

# Een siliconen orthese nodig?



Ortho-technics

Bij ons bent u in goede handen.



Prothesen | Epithesen | **Maatwerk orthesen** | Confectie orthesen |  
Silverringsplints | Orthopedische korsetten | Sport orthesen/prothesen

*Wij helpen u vooruit!*

# Wij helpen u vooruit!

Bij een blessure of een chronische aandoening aan de pols of hand, kunnen de meest normale lichamelijke activiteiten een uitdaging zijn. Een siliconen orthese kan uw lichaam dan de extra ondersteuning bieden die het nodig heeft.

In deze folder geven we u meer inzicht in het proces van het verstrekken van een siliconen orthese.

## Wat is een siliconen orthese?

Een siliconen orthese is een uitwendig gedragen hulpmiddel ter ondersteuning van een lichaamsdeel.

Een siliconen orthese wordt voor u volledig op maat vervaardigd en past dus perfect bij uw lichaam.



**SEMHCertificering**

**Ortho-technics is SEMH gecertificeerd en voldoet aan de strenge eisen van deze onafhankelijke stichting. Daarnaast zijn we aangesloten bij brancheorganisatie NVOS-Orthobanda.**



## Ortho-technics: uw specialist in orthopedische hulpmiddelen

Bij **Ortho-technics** werken bevlogen vakmensen die zich elke dag inzetten om u vooruit te helpen. Wij begeleiden u gedurende het hele traject en willen u zoveel mogelijk ontzorgen. Onze orthopedisch technologen zijn verantwoordelijk voor de maatname, productie en nazorg van uw orthese en hebben daartoe een hbo-bacheloropleiding afgerond.



*Bij Ortho-technics wordt er echt naar me geluisterd en naar wat ik nodig heb.*




*Naomi Lindelauf*



*Silicone is huidvriendelijk, waterbestendig en kan in elke gewenste kleur geleverd worden.*



*Nikki van Doornen,  
Orthopedisch Technoloog*

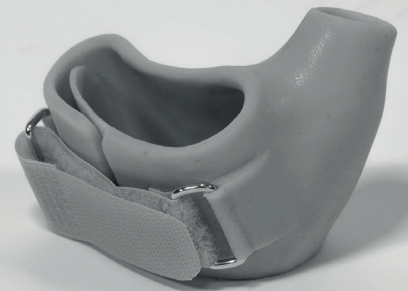

# Uw siliconen orthese, onze expertise

Een siliconen orthese is maatwerk en wordt volledig met de hand vervaardigd. We nemen de tijd om voor u een optimaal functionerende voorziening te maken.

## **Intakegesprek**

Samen met u plannen we een intakegesprek in met één van onze orthopedisch technologen. Indien gewenst raadplegen we ook uw behandelend therapeut.

## **Maatname**


Vervolgens nemen we de precieze maten op met een gipsafdruk. Daarna wordt de siliconen orthese vervaardigd door de orthopedisch technoloog. Dit duurt ongeveer drie weken. Bij complexe producten kan de orthopedisch technoloog kiezen voor een tussentijdse pasafspraken voordat de orthese afgeleverd wordt. Het kan ook voorkomen dat er nog een proeffase nodig is.

## **Controle**

Als de orthese wordt afgeleverd, wordt er meteen een controleafspraken gepland. Dit zal drie weken later zijn. Liever eerder een afspraak? Dan kunt u eenvoudig telefonisch een afspraak inplannen via 085 - 273 36 10.



# De zorg voor uw siliconen orthese

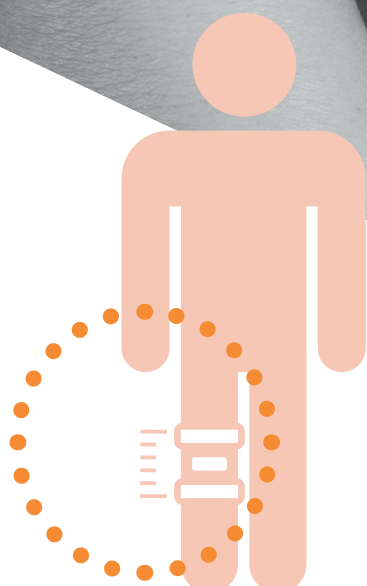

## Onderhoud en reparatie

Een siliconen orthese is iets poreus en kan in de eerste maand nog wat verkleuren. Het is belangrijk deze goed te onderhouden.

- Spoel dagelijks af met water en een PH-neutrale zeep. Let erop dat het klittenband gesloten is. Eenmaal afgedroogd kunt u de orthese weer gebruiken.
- Is de orthese vuil? Laat maximaal 1 uur weken in een bak warm water met Steradent of soda.
- Bij hardnekkig vuil kunt u een doek met wat bio-ethanol of Dasty gebruiken. Gelieve dit te beperken.
- Bij overmatige transpiratie kunt u een dunne kous of handschoen onder de orthese dragen. Vraag hiernaar bij uw orthopedisch technoloog.

## Let op

- Jeans kunnen blauw afgeven op de orthese. De verkleuring is dan niet meer te verwijderen.
- Beschadigingen door bijvoorbeeld scherpe voorwerpen kunnen niet meer worden gerepareerd.

## Gebruiksdur en garantie

De gebruiksduur en garantie kan per zorgverzekeraar en zorgpolis verschillen. We raden u aan vooraf uw verzekeringspolis te controleren.

# Altijd dichtbij

Bel voor een afspraak bij één van onze orthopedisch technologen: 085 - 273 36 10.

## Onze contactgegevens

### Ortho-technics B.V.

Groenenweg 1  
6432 HG Hoensbroek  
T 085 - 273 36 10 | F 085 - 273 36 11  
info@ortho-technics.nl  
www.ortho-technics.nl



Ortho-technics

Ortho-technics is gevestigd op diverse locaties in Zuid-Limburg en Noord-Brabant. Bij al onze locaties vindt u gratis parkeergelegenheid voor de deur.

**Hoensbroek**  
Groenenweg 1  
6432 HG

**Hoensbroek,  
locatie Adelante**  
Schuureikenweg 60  
6432 HX

**Sittard**  
Kleine Steeg 7-H  
6131 KJ

**Eindhoven**  
Croy 7  
5653 LC

